



The World's Largest Range of Diagnostic Kits for Analytical Chromatographic Systems (HPLC, GC , GC-MS, LC-MS/MS)



CONTROLLO LIOFILO PLASMATICO PER LAMOTRIGINA LIVELLI 1 e 2

Cod. Z03019

OBIETTIVO

Questi controlli plasmatici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 2 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 mese a 2-8 °C e 6 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questo controllo in matrice umana deve essere trattato con cura e considerato come potenzialmente infettivo.

009	Oct 2018	Oct 2021

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z03017 CONTROLLO PLASMATICO PER LAMOTRIGINA - LIVELLO 1 **5 x 2 ml**
- Z03018 CONTROLLO PLASMATICO PER LAMOTRIGINA - LIVELLO 2 **5 x 2 ml**
- Z03019 CONTROLLO PLASMATICO PER LAMOTRIGINA - LIVELLI 1 e 2 **2 x 5 x 2 ml**

CONCENTRAZIONI

COD.

Z03019

LOT		
009	Oct 2018	Oct 2021

LIVELLO 1

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	RANGE
LAMOTRIGINA	mg/l	3,0	2,1 – 3,8

LIVELLO 2

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	RANGE
LAMOTRIGINA	mg/l	18,2	12,7 – 23,7

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

CE

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



The ONLY Italian Company that Researches, Develops and Produces
diagnostic KITS for HPLC, GC, GC-MS, LC-MS/MS

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 13485 =

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. + 39 071 74 50 790 Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com, info@eurekakit.com
www.eurekaone.com, www.eurekakit.com

Release N° 003

Maggio 2019