



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

## CONTROLLO LIOFILO SIERICO PER METFORMINA – LIVELLI 1 e 2

Cod. Z88119

### OBIETTIVO

Questi controlli sierici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

### RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 2 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

### STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 mese a 2-8 °C e 6 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

### PRECAUZIONI

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
005	Feb 2022	Feb 2025

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z88119 CONTROLLO SIERICO PER METFORMINA – LIVELLI 1 e 2

2 x 5 x 2 ml

Release N° 003

Maggio 2019

CONCENTRAZIONI  
COD. Z88119

LOT		
005	Feb 2022	Feb 2025

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2
METFORMINA	mg/l	2,5	1,8 – 3,3	9,3	6,5 – 12,1

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

CE

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

EUREKA srl – LAB DIVISION ,  
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY  
Tel. + 39 071 74 50 790  
Fax. + 39 071 74 96 579  
[info@eurekaone.com](mailto:info@eurekaone.com)  
[www.eurekait.com](http://www.eurekait.com)



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 13485 =

Release N° 003

Maggio 2019