



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLO PER AMINE BIOGENICHE PLASMATICHE – LIVELLI 1, 2 e 3

(Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina, Metanefrina, Nometanefrina, 3-Metossitiramina)

Cod. LC97019

OBIETTIVO

Questi controlli plasmatici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in tre range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a -25/-15 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 giorno a 2-8 °C e 7 giorni a -25/-15 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC97019 CONTROLLO PER AMINE BIOGENICHE PLASMATICHE LIVELLI 1, 2 e 3 3 x 5 x 1 ml

N° 006	09/2025
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC97019

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2	VALORE MEDIO L3	RANGE L3
ADRENALINA	pg/mL						
	nmol/L						
NORADRENALINA	pg/mL						
	nmol/L						
DOPAMINA	pg/mL						
	nmol/L						
METANEFrina	pg/mL						
	nmol/L						
NORMETANEFrina	pg/mL						
	nmol/L						
3-METOSSITIRAMINA	pg/mL						
	nmol/L						

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com