



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

**CONTROLLI LIOFILI URINARI PER AMMINE BIOGENICHE – LIVELLI 1, 2 e 3**  
(Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina, Metanefrina, Normetanefrina, 3-Metossitiramina,  
VMA, HVA, 5-HIAA)

**Cod. LC77019**  
**DA USARE CON I KIT CODICE LC77010-LC14610**

**OBIETTIVO**

Questi controlli urinari sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in tre range di concentrazione diversi.

**RICOSTITUZIONE**

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

**STOCCAGGIO E STABILITA'**

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2–8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 3 giorni a 2-8 °C e 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

**PRECAUZIONI**

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:**

- LC77019 CONTROLLO URINARIO PER AMMINE BIOGENICHE - LIVELLI 1, 2 e 3    3 x 5 x 1 ml

|        |         |
|--------|---------|
| N° 004 | 06/2024 |
|--------|---------|

CONCENTRAZIONI  
COD. LC77019

|     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LOT |  |  |
|     |                                                                                     |                                                                                     |

AMMINE LIBERE URINARIE (CATECOLAMINE/METANEFRINE/TRITTICO)

| ANALITA           | UNITA' DI MISURA | VALORE MEDIO L1 | RANGE L1 | VALORE MEDIO L2 | RANGE L2 | VALORE MEDIO L3 | RANGE L3 |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| ADRENALINA        | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| NORADRENALINA     | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| DOPAMINA          | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| METANEFRINA       | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| NORMETANEFRINA    | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| 3-METOSSITIRAMINA | µg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| VMA               | mg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| HVA               | mg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |
| 5-HIAA            | mg/l             |                 |          |                 |          |                 |          |

## METANEFRIE TOTALI URINARIE

| <i>ANALITA</i>    | <i>UNITA' DI MISURA</i> | <i>VALORE MEDIO L1</i> | <i>RANGE L1</i> | <i>VALORE MEDIO L2</i> | <i>RANGE L2</i> | <i>VALORE MEDIO L3</i> | <i>RANGE L3</i> |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| METANEFRIINA      | µg/l                    |                        |                 |                        |                 |                        |                 |
| NORMETANEFRIINA   | µg/l                    |                        |                 |                        |                 |                        |                 |
| 3-METOSSITIRAMINA | µg/l                    |                        |                 |                        |                 |                        |                 |

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



**FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY**



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION  
Via M. D'Antona 28  
60033 Chiaravalle (AN) - Italy  
Tel +39 071 7450790  
[eureka-support@sentinel.it](mailto:eureka-support@sentinel.it)  
[www.eurekakit.com](http://www.eurekakit.com)