



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLO LIOFILO URINARIO PER AMINE BIOGENICHE - LIVELLI 1 e 2
(Noradrenalina, Adrenalina, Dopamina, VMA, HVA, 5-HIAA, Metanefrina, Normetanefrina, 3-Metossitiramina, Idrossiprolina)

Cod. Z10559

OBIETTIVO

Questi controlli urinari sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 3 mesi a -20 °C (eccetto HVA e 5-HIAA che sono stabili 1 mese a -20 °C). Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questo controllo in matrice umana deve essere trattato con cura e considerato come potenzialmente infettivo.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z10559 CONTROLLO URINARIO PER AMINE BIOGENICHE - LIVELLI 1 e 2 2 x 5 x 5 ml

N° 003	06/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI

COD. Z10559

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2
NORADRENALINA	µg/l				
ADRENALINA	µg/l				
DOPAMINA	µg/l				
VMA	mg/l				
HVA	mg/l				
5-HIAA	mg/l				
METANEFrina	µg/l				
NORMETANEFrina	µg/l				
3-METOSSITIRAMINA	µg/l				
IDROSSIPROLINA	mg/l				

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com