



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLO LIOFILO PLASMATICO PER ORMONI STEROIDEI

- LIVELLI 1, 2 e 3

(11-Deossicorticosterone, 11-Deossicortisol, 17-OH-Pregnenolone, 17-OH-Progesterone, 21-Deossicortisol, Aldosterone, Androstenedione, Androsterone, Corticosterone, Cortisol, Cortisone, DHEA, DHEAS, Diidrotestosterone, β -Estradiolo, Estrone, Pregnenolone, Progesterone, Testosterone)

Cod. LC72319

OBIETTIVO

Questi controlli plasmatici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi. Devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 6 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questo controllo in matrice umana deve essere trattato con cura e considerato come potenzialmente infettivo.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC72319 CONTROLLO PLASMATICO PER ORMONI STEROIDEI - LIVELLI 1, 2 e 3 **3 x 5 x 1 ml**

N° 003	06/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC72319

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2	VALORE MEDIO L3	RANGE L3
11-DEOSSICORTICOSTERONE	ng/ml						
11-DEOSSICORTISOLO	ng/ml						
17-OH-PREGNENOLONE	ng/ml						
17-OH-PROGESTERONE	ng/ml						
21-DEOSSICORTISOLO	ng/ml						
ALDOSTERONE	ng/ml						
ANDROSTENEDIONE	ng/ml						
ANDROSTERONE	ng/ml						
CORTICOSTERONE	ng/ml						
CORTISOLO	ng/ml						
CORTISONE	ng/ml						
DHEA	ng/ml						
DHEAS	ng/ml						
DIIDROTESTOSTERONE	ng/ml						
β-ESTRADIOLO	ng/ml						
ESTRONE	ng/ml						
PREGNENOLONE	ng/ml						
PROGESTERONE	ng/ml						
TESTOSTERONE	ng/ml						

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com

N° 003	06/2024
--------	---------