



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE LIOFILO PLASMATICO PER 25-OH-VITAMINA D₃ e 25-OH-VITAMINA D₂

Cod. LC19016
DA USARE CON I KIT CODICE LC19110-15

OBIETTIVO

Questi calibratori plasmatici sono usati per calibrare il sistema HPLC nella determinazione quantitativa dell'analita in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su sette punti. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 24 mesi dalla data di preparazione se conservati a - 20 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 6 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC19016 CALIBRATORE PLASMATICO PER 25-OH-VITAMINA D₃ e VITAMINA D₂ 7 x 2 x 1 ml

N° 004	07/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC19016

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
25-OH-VITAMINA D ₃	ng/ml	n.d.						
25-OH-VITAMINA D ₂	ng/ml	n.d.						

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com