



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLO PER SOSTANZE D'ABUSO SEQUESTRI – LIVELLI 1 e 2

(Buprenorfina, Amfetamina, Metamfetamina, MDMA, MDA, MDE, MBDB, Ketamina, Diacetilmorfina, Efedrina, Pseudoefedrina, Metorfano, 6-Monoacetilmorfina, delta-9-THC, Morfina, Cannabidiolo [CBD], Aminofenazone, Benzocaina, Diltiazem, Ibuprofene, Idrossizina, Levamisolo, Lidocaina, Naloxone, Nicotina, Noscapina, Paroxetina, Procaina, Procinamide, Sulfametossazolo, Trimetoprim, Tropacocaina, Paracetamolo, Caffeina, Cocaina, Metadone, Fenacetina, Acido Acetilsalicilico)

Cod. LC20019

OBIETTIVO

Questi controlli sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Una volta aperta la vial, prelevarne il volume necessario, richiuderla con il reagente non utilizzato e conservare a -20°C. Stabile 6 mesi. Non usarlo dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC20019 CONTROLLI PER SOSTANZE D'ABUSO SEQUESTRI 2 x 4 x 1,5 ml

N° 004	06/2024
--------	---------

		

CONCENTRAZIONI SE I CAMPIONI DA TRATTARE SONO COME DA FASE 4a della METODICA D'USO LC20000:

Analita	Controllo 1	
	VALORE MEDIO	RANGE
Buprenorfina, Amfetamina, Metamfetamina, MDMA, MDA, MDE, MBDB, Ketamina, Diacetilmorfina, Efedrina, Pseudoefedrina, Metorfano, 6-Monoacetilmorfina, delta-9-THC, Morfina, CBD, Aminofenazone, Benzocaina, Diltiazem, Ibuprofene, Idrossizina, Levamisolo, Lidocaina, Naloxone, Nicotina, Noscapina, Paroxetina, Procaina, Procaïnamide, Sulfametossazolo, Trimetoprim, Tropacocaina		
Paracetamolo, Caffeina, Cocaina, Metadone, Fenacetina, Acido Acetilsalicilico		

Analita	Controllo 2	
	VALORE MEDIO	RANGE
Buprenorfina, Amfetamina, Metamfetamina, MDMA, MDA, MDE, MBDB, Ketamina, Diacetilmorfina, Efedrina, Pseudoefedrina, Metorfano, 6-Monoacetilmorfina, delta-9-THC, Morfina, CBD, Aminofenazone, Benzocaina, Diltiazem, Ibuprofene, Idrossizina, Levamisolo, Lidocaina, Naloxone, Nicotina, Noscapina, Paroxetina, Procaina, Procaïnamide, Sulfametossazolo, Trimetoprim, Tropacocaina		
Paracetamolo, Caffeina, Cocaina, Metadone, Fenacetina, Acido Acetilsalicilico		

CONCENTRAZIONI SE I CAMPIONI DA TRATTARE SONO COME DA FASE 4b della METODICA D'USO LC20000:

Analita	Controllo 1	
	VALORE MEDIO	RANGE
Buprenorfina, Amfetamina, Metamfetamina, MDMA, MDA, MDE, MBDB, Ketamina, Diacetilmorfina, Efedrina, Pseudoefedrina, Metorfano, 6-Monoacetilmorfina, delta-9-THC, Morfina, CBD, Aminofenazone, Benzocaina, Diltiazem, Ibuprofene, Idrossizina, Levamisolo, Lidocaina, Naloxone, Nicotina, Noscapina, Paroxetina, Procaina, Procaïnamide, Sulfametossazolo, Trimetoprim, Tropacocaina		
Paracetamolo, Caffeina, Cocaina, Metadone, Fenacetina, Acido Acetilsalicilico		

Analita	Controllo 2	
	VALORE MEDIO	RANGE
Buprenorfina, Amfetamina, Metamfetamina, MDMA, MDA, MDE, MBDB, Ketamina, Diacetilmorfina, Efedrina, Pseudoefedrina, Metorfano, 6-Monoacetilmorfina, delta-9-THC, Morfina, CBD, Aminofenazone, Benzocaina, Diltiazem, Ibuprofene, Idrossizina, Levamisolo, Lidocaina, Naloxone, Nicotina, Noscapina, Paroxetina, Procaina, Procaïnamide, Sulfametossazolo, Trimetoprim, Tropacocaina		
Paracetamolo, Caffeina, Cocaina, Metadone, Fenacetina, Acido Acetilsalicilico		

*Le procedure di produzione e validazione/controllo qualità del singolo lotto sono condotte utilizzando il metodo cromatografico LC/MS/MS validato secondo le linee guida internazionali della Food and Drug Administration (FDA-May 2001) e dell'International Conference of Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH-Q2-R1- Nov 2005). Il valore medio e la deviazione standard indicati sono stati ottenuti in fase di validazione del lotto processando quattro flaconi per livello in doppio.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com