



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLI LIOFILI SU SANGUE INTERO PER SOSTANZE D'ABUSO – LIVELLI 1 e 2

(Morfina, Codeina, 6-MAM, Cocaina, BEG, Cocaetilene, Ecgonina Metil Estere, Amfetamina, Metamfetamina, 3,4-MDMA, 3,4-MDA, 3,4-MDE, MBDB, Metadone, EDDP, Buprenorfina, Norbuprenorfina, THC, THC COOH, 11-OH-THC)

Cod. SC1009B
DA USARE CON IL KIT CODICE SC1000

OBIETTIVO

Questi controlli su sangue intero sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa delle droghe d'abuso in essi contenute. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, lasciar riposare per almeno 30 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a -20 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C **tranne Cocaina e Cocaetilene che vanno ricostituiti ed analizzati nello stesso giorno**. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- SC1009B CONTROLLI SU SANGUE INTERO PER SOSTANZE D'ABUSO – LIVELLI 1 e 2 2 x 5 x 1 ml

N° 004	10/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI

COD.

SC1009B

		

LIVELLO 1

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE	RANGE	VALORE MEDIO OTTENUTO $\pm$ DS*
3,4 – MDE	ng/ml			
3,4 – MDMA	ng/ml			
3,4 – MDA	ng/ml			
AMFETAMINA	ng/ml			
METAMFETAMINA	ng/ml			
COCAINA	ng/ml			
MORFINA	ng/ml			
CODEINA	ng/ml			
6-MONOACETILMORFINA	ng/ml			
BEG	ng/ml			
COCAETILENE	ng/ml			
METADONE	ng/ml			
EDDP	ng/ml			
MBDB	ng/ml			
BUPRENORFINA	ng/ml			
NORBUPRENORFINA	ng/ml			
ECGONINA METIL ESTERE	ng/ml			
DELTA-9-THC	ng/ml			
DELTA-9-THC-COOH	ng/ml			
11-OH-THC	ng/ml			

LIVELLO 2

<i>ANALITA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE</i>	<i>RANGE</i>	<i>VALORE MEDIO OTTENUTO $\pm$ DS*</i>
3,4 – MDE	ng/ml			
3,4 – MDMA	ng/ml			
3,4 – MDA	ng/ml			
AMFETAMINA	ng/ml			
METAMFETAMINA	ng/ml			
COCAINA	ng/ml			
MORFINA	ng/ml			
CODEINA	ng/ml			
6-MONOACETILMORFINA	ng/ml			
BEG	ng/ml			
COCAETILENE	ng/ml			
METADONE	ng/ml			
EDDP	ng/ml			
MBDB	ng/ml			
BUPRENORFINA	ng/ml			
NORBUPRENORFINA	ng/ml			
ECGONINA METIL ESTERE	ng/ml			
DELTA-9-THC	ng/ml			
DELTA-9-THC-COOH	ng/ml			
11-OH-THC	ng/ml			

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
 Via M. D'Antona 28
 60033 Chiaravalle (AN) - Italy
 Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com