



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLI LIOFILI URINARI PER SOSTANZE D'ABUSO – LIVELLI 1 e 2

(Morfina, Codeina, 6-MAM, Cocaina, BEG, Cocaetilene, Amfetamina, Metamfetamina, 3,4-MDMA, 3,4-MDA, 3,4-MDE, MBDB, Metadone, EDDP, Buprenorfina, Norbuprenorfina, THC-COOH, Diidrocodeina, Ketamina, Ossicodone, Morfina-6-beta-glucuronide, Morfina-3-beta-glucuronide, Norbuprenorfina glucuronide, Codeina-6-beta-glucuronide, THC-COOH-glucuronide, Buprenorfina glucuronide)

Cod. SC1009U

DA USARE CON IL KIT CODICE SC1000

OBIETTIVO

Questi controlli urinari sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa delle droghe d'abuso in essi contenute. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 12 mesi dalla data di preparazione se conservati a -20 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 2 giorni a 2-8 °C e 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- SC1009U CONTROLLI URINARI PER SOSTANZE D'ABUSO – LIVELLI 1 e 2

2 x 5 x 1 ml

N° 005	10/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI

COD.		SC1009U
		

LIVELLO 1

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE	RANGE
Morfina	ng/ml		
Codeina	ng/ml		
Diidrocodeina	ng/ml		
6-MAM	ng/ml		
Cocaina	ng/ml		
BEG	ng/ml		
Cocaetilene	ng/ml		
Metadone	ng/ml		
EDDP	ng/ml		
Ossicodone	ng/ml		
Morfina-6-beta-glucuronide	ng/ml		
Morfina-3-beta-glucuronide	ng/ml		
Codeina-6-beta-glucuronide	ng/ml		
Amfetamina	ng/ml		
Metamfetamina	ng/ml		
MDMA	ng/ml		
MDA	ng/ml		
MDE	ng/ml		
MBDB	ng/ml		
Ketamina	ng/ml		
THC-COOH	ng/ml		
THC-COOH-glucuronide	ng/ml		
Norbuprenorfina	ng/ml		
Norbuprenorfina glucuronide	ng/ml		
Buprenorfina	ng/ml		
Buprenorfina Glucuronide	ng/ml		

LIVELLO 2

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE	RANGE
Morfina	ng/ml		
Codeina	ng/ml		
Diidrocodeina	ng/ml		
6-MAM	ng/ml		
Cocaina	ng/ml		
BEG	ng/ml		
Cocaetilene	ng/ml		
Metadone	ng/ml		
EDDP	ng/ml		
Ossicodone	ng/ml		
Morfina-6-beta-glucuronide	ng/ml		
Morfina-3-beta-glucuronide	ng/ml		
Codeina-6-beta-glucuronide	ng/ml		
Amfetamina	ng/ml		
Metamfetamina	ng/ml		
MDMA	ng/ml		
MDA	ng/ml		
MDE	ng/ml		
MBDB	ng/ml		
Ketamina	ng/ml		
THC-COOH	ng/ml		
THC-COOH-glucuronide	ng/ml		
Norbuprenorfina	ng/ml		
Norbuprenorfina glucuronide	ng/ml		
Buprenorfina	ng/ml		
Buprenorfina Glucuronide	ng/ml		

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
 Via M. D'Antona 28
 60033 Chiaravalle (AN) - Italy
 Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com