



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALBRATORE LIOFILO SIERICO PER BENZODIAZEPINE 1
(*Bromazepam, Lorazepam, Clonazepam, Flunitrazepam, Clordemetildiazepam*)

Cod. Z34016
DA USARE CON IL KIT CODICE Z34610

OBIETTIVO

Questi calibratori sierici sono usati per calibrare il sistema HPLC nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su un punto. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

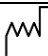

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 5 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI



Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z34016 CALBRATORE SIERICO PER BENZODIAZEPINE 1 4 x 5 ml

CONCENTRAZIONI**COD.****Z34016**

LOT		

<i>ANALITA</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE</i>
BROMAZEPAM	µg/l	
LORAZEPAM	µg/l	
CLONAZEPAM	µg/l	
FLUNITRAZEPAM	µg/l	
CLORDEMETILDIAZEPAM	µg/l	

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

**FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**

EUREKA S.R.L. LAB DIVISION

Via M. D'Antona 28

60033 Chiaravalle (AN) - Italy

Tel +39 071 7450790

eureka-support@sentinel.it

www.eurekakit.com