



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS  
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

**CONTROLLO LIOFILO PLASMATICO PER ANTIBIOTICI – LIVELLI 1 e 2**  
*(Ceftriaxone, Ampicillina, Ciprofloxacina, Levofloxacina, Linezolid, Piperacillina, Tazobactam,  
Ceftazidime, Meropenem, Cefoxitina, Daptomicina)*  
**Cod. Z91019**

**OBIETTIVO**

Questi controlli plasmatici sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi. Devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

**RICOSTITUZIONE**

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

**STOCCAGGIO E STABILITA'**

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 2 mesi a -25/-15 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

**PRECAUZIONI**

Questo controllo in matrice umana deve essere trattato con cura e considerato come potenzialmente infettivo.

LOT		

**CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:**

- Z91019 CONTROLLO PLASMATICO PER ANTIBIOTICI - LIVELLI 1 e 2

**2 x 3 x 1 ml GRUPPO 1**  
**2 x 3 x 1 ml GRUPPO 2**

N° 003	09/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI  
COD. Z91019

LOT		

<i>ANALITI GRUPPO 1</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE MEDIO L1</i>	<i>RANGE L1</i>	<i>VALORE MEDIO L2</i>	<i>RANGE L2</i>
CEFTRIAXONE	mg/l				
AMPICILLINA	mg/l				
CIPROFLOXACINA	mg/l				
LEVOFLOXACINA	mg/l				
LINEZOLID	mg/l				
PIPERACILLINA	mg/l				

<i>ANALITI GRUPPO 2</i>	<i>UNITA' DI MISURA</i>	<i>VALORE MEDIO L1</i>	<i>RANGE L1</i>	<i>VALORE MEDIO L2</i>	<i>RANGE L2</i>
TAZOBACTAM	mg/l				
CEFTAZIDIME	mg/l				
MEROPENEM	mg/l				
CEFOXITINA	mg/l				
DAPTOMICINA	mg/l				

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



**FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY**



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION  
Via M. D'Antona 28  
60033 Chiaravalle (AN) - Italy  
Tel +39 071 7450790  
eureka-support@sentinel.it  
www.eurekakit.com